

# CARDIOVIT AT-1 G2


Instellingen




Medische Vakhandel



Art. no. 2.511235 Rev.: d  
\*2.511235\*

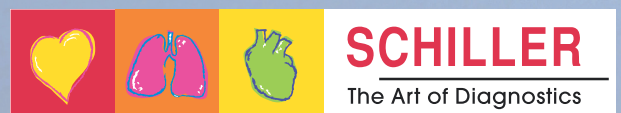

## Keyboard

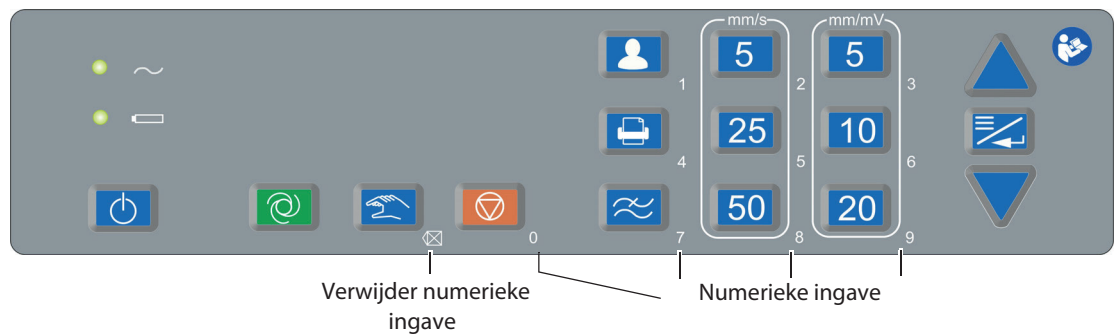

Aan/uit knop



Start een automatisch rust ECG



Start een automatisch rust ECG  
Delete of backspace numerieke ingave



- Stop print van een automatische of handmatig ECG
- Sluit het menu



Ingave patient informatie. Druk 2 x voor de vorige patient data



Print een ECG



Verander het myogram filter (Off, 25, 40, 150 Hz).  
Na het ECG gaat het weer terug naar het standaard opgegeven filter



Instelling voor ECG snelheid en amplitude.



(.)



Menu/Enter key and Up/down toetsen



(-)




etc.

Bij numerieke ingave zijn deze toetsen actief

# Systeeminstellingen

Systeeminstellingen worden opgeslagen bij sluiten van het menu  
Ga eerst naar settings en selecteer Nederlands als taal

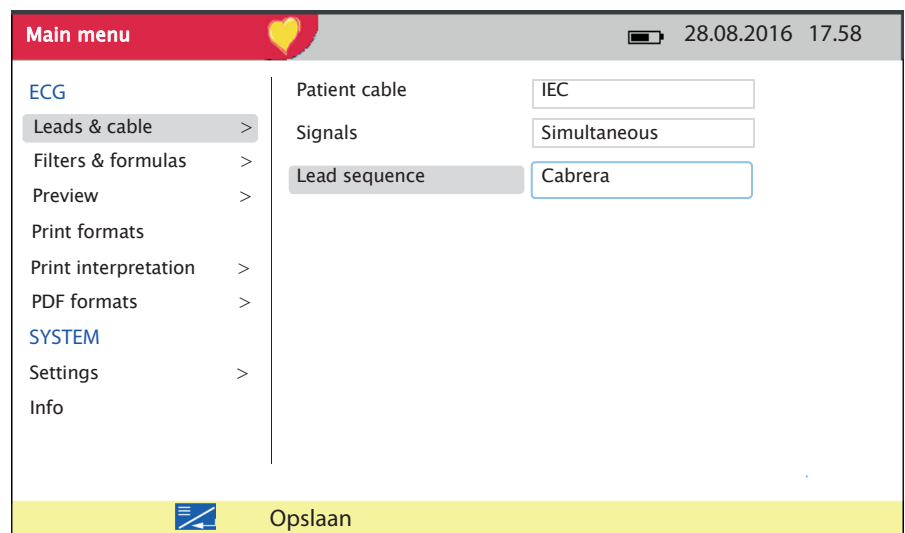

1. Afleidingen en kabels > IEC/Simultaan/Standaard
2. Notchfilter AC 50 Hz Myogramfilter 40 HZ QTC berekening Bazett
3. Myogramfilter 40 HZ QTC berekening Bazett
4. ECG 4 pagina 25mm/s Gemiddelde cycli UIT Ritme afleiding 1 II  
Ritme afleiding 2 V1 Markeringen UIT Metingen UIT
5. Interpretatie AAN Onbevestigd rapport UIT Afwijkend ECG UIT
6. PDF export aan

Rest naar eigen inzicht zoals PDF